

**Manual de instrucciones  
básicas en español  
para utilizar el  
equipo de comunicación  
*"Four compartment scanning  
communicator with icon holders"***



© 2013 PRATP

El contenido de este folleto fue subvencionado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos (DEEU) bajo la Propuesta Núm. H224A130051. Sin embargo, este documento no representa necesariamente la política del DEEU, por lo que no debe inferirse que cuenta con el endoso oficial del Gobierno Federal.

**Equipo de Comunicación**  
**Four Compartment Scanning Communicator with Icon Holders**

**1. ¿Para qué se utiliza este equipo de comunicación?**

Este equipo provee una herramienta de comunicación para aquellas personas que no pueden comunicarse de forma oral.

**2. ¿A quién va dirigido este equipo?**

Este equipo es una alternativa para aquellas personas cuyas destrezas de comunicación oral limitan su capacidad para transmitir mensajes. Además resulta muy idóneo para personas cuyo nivel de simbolización es de objetos concretos (aunque en el mismo se pueden utilizar fotos y símbolos pictóricos) o que tienen algún impedimento motor por el cual necesitan utilizar el rastreo para seleccionar símbolos al comunicarse.

**3. Características del equipo**

Es un equipo estático, de selección directa o indirecta, con varios niveles para grabar mensajes y salida de voz digital. El equipo tiene un tamaño de 18" L x 10 "W X 6"H.

**Comandos básicos:**

**Parte frontal**




**A.** Luces que indican el rastreo lineal

**B.** Sostenedores para fotos o símbolos pictóricos

**C.** Área de selección (presionando las placas) cuando el acceso es directo

**D.** Área para colocar objetos concretos que representen el mensaje a transmitirse

## Parte posterior

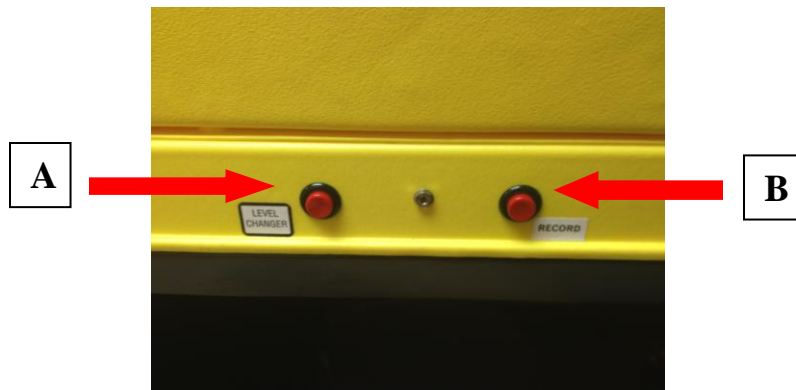

- A. Botón para cambiar de nivel
- B. Botón para grabar

## Parte lateral



- A. Manija para prender o apagar el equipo y graduar el volumen.

## Parte inferior



A. Compartimento de baterías. El equipo requiere 4 baterías AA.

### 4. ¿Cómo puede ayudarlo este equipo?

<b>Si necesita:</b>	<b>Este equipo puede ayudarlo a:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ser independiente a nivel comunicológico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Comunicarse de manera efectiva con las distintas personas que se encuentran en sus ambientes de participación.</li><li>• Promover su participación en un proceso de toma de decisiones.</li><li>• Maximizar sus capacidades comunicológicas.</li></ul>

### Para información adicional:

Se puede comunicar con el Proyecto Permanente de Préstamos de Equipos de Asistencia Tecnológica.

Teléfono: 787-474-9999