



Universidad de Puerto Rico
Administración Central
Instituto FILIUS
Vicepresidencia de Investigación y Tecnología
Programa de Asistencia Tecnológica de PR
RECURSO CON SENTIDO

Manual de instrucciones básicas en español para utilizar el *MagniSight Explorer*



© 2014 PRATP

El contenido de este folleto fue subvencionado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos (DEEU) bajo la Propuesta Núm. H224A130051.
Sin embargo, este documento no representa necesariamente la política del DEEU, por lo que no debe inferirse que cuenta con el endoso oficial del Gobierno Federal.


Diseño de: Gretchen M. Matías Lebrón
Preparado por: Cristina López González
Revisado en Julio 2014

Este material no representa necesariamente un endoso al producto o la compañía que lo manufactura o distribuye.

Información Básica del Magnisight Explorer

El video MagniSight Explorer (CCTV) es una herramienta de magnificación que permite a las personas con poca visión ampliar imágenes o documentos desde 4x hasta 70x de magnificación dependiendo del tamaño del monitor. Ofrece diferentes opciones para cambiar el contraste: a color, blanco y negro y otras combinaciones de alto contraste. Este equipo permite a las personas con poca visión sentirse más independientes y capaces de realizar las actividades cotidianas. Entre las actividades del diario vivir que se pueden realizar con el MagniSight Explorer se encuentran: leer el periódico, ver una fotografía y coser.

Diagrama del MagniSight Explorer

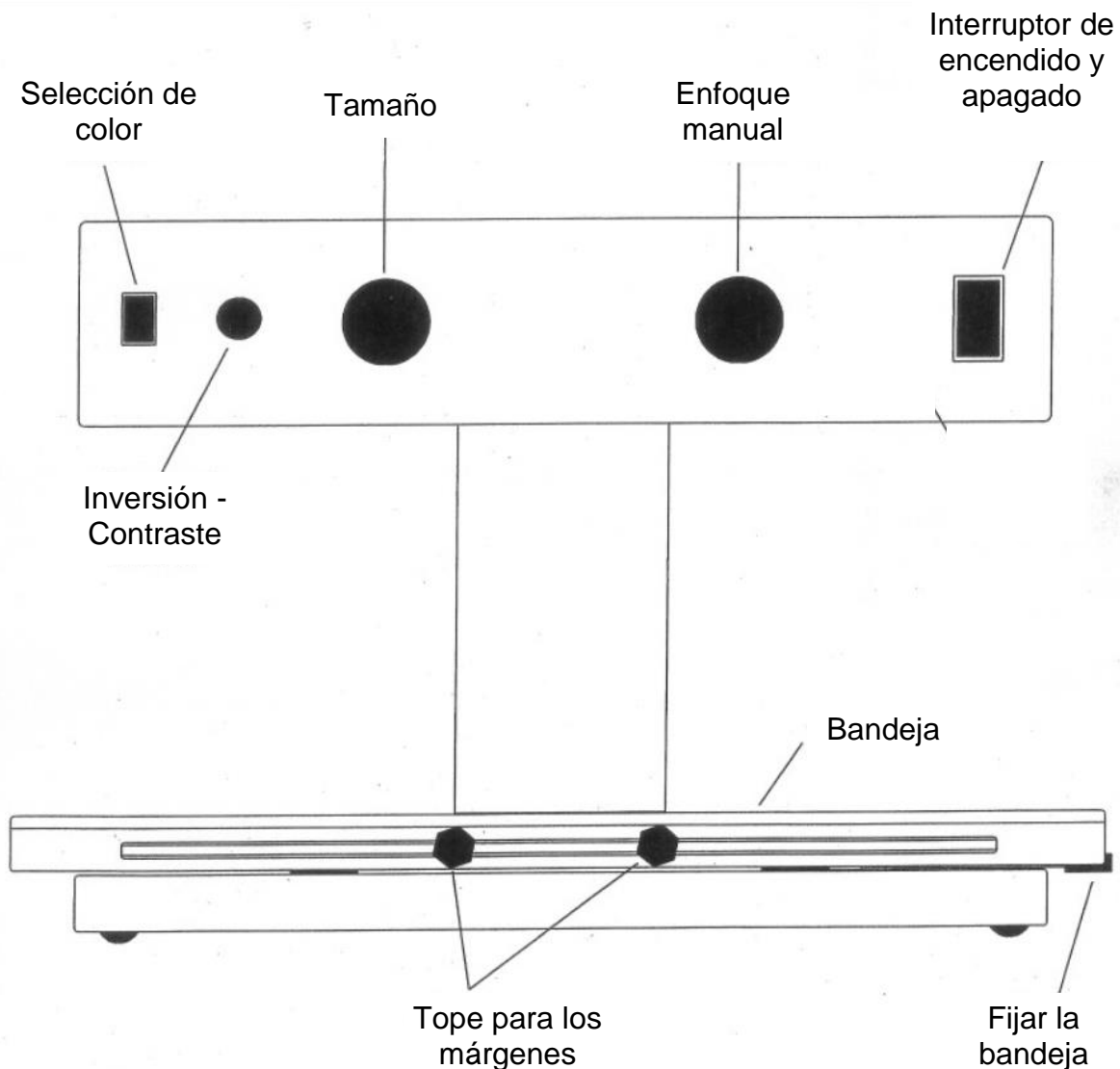

Comandos Básicos

1. Selección de color: Al presionar este botón puede cambiar cómo ve la imagen, a todo a color o en diferentes combinaciones de dos colores.
2. Inversión - Contraste: Este botón tiene dos funciones. Se utiliza para invertir los colores del texto y el fondo. También se usa para aumentar y disminuir el contraste de la imagen.
3. Tamaño. Con este botón puede aumentar y disminuir la magnificación.
4. Enfoque manual: Con este botón puede mejorar manualmente el enfoque de la imagen.
5. Interruptor de encendido y apagado: Si empuja el interruptor hacia arriba, enciende el equipo; si lo presiona hacia abajo, lo apaga.
6. Bandeja. En esta bandeja puede colocar la imagen, documento o accesorio que desee magnificar y moverlo hacia al frente, atrás, la izquierda o la derecha para que pueda verlo con todo su entorno.
7. Tope de los márgenes: Estos botones lo ayudan a mover la bandeja de izquierda a derecha.
8. Fijar la bandeja: Con este botón puede fijar la bandeja para que no se mueva.

Compañía que lo manufactura:

MagniSight Inc.

Dirección física: 802 Nichols Blvd. Colorado Springs, Colorado 80907

Teléfono: (800) 753-4767

Fax: (719) 578-9887

Web: <http://www.magnisight.com/>

Distribuidores en Puerto Rico:

Optometrics / Puerto Rico Low Vision Center

Dirección física: 369 Ave. Domenech San Juan, PR. 00918

Teléfono: (787) 754 - 0814

UMECO

Dirección física: 171 Calle Federico Costa, Esq. Buonomo, Suite 100,
San Juan, PR. 00918-1307

Teléfono: (787) 620 - 0011

Web: <http://www.umecopr.com.>

Assistive Technology Specialists, Inc.

Dirección física: Calle Extensión Sur # 523 Dorado, PR. 00646

Teléfonos: (787) 223 - 5566

(939) 630 -1729

Web: <http://www.atspecialist.co>

Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico

**Dirección postal: Jardín Botánico Sur, 1187 Calle Flamboyán
San Juan, P.R. 00926-1117**

Teléfono: (787) 474-9999

Libre de Costo: 1-855-449-2999

VRS: (787)523-8681

<http://www.pratp.upr.edu>